




SWISS INNOVATION APPLIED TO BEAUTY

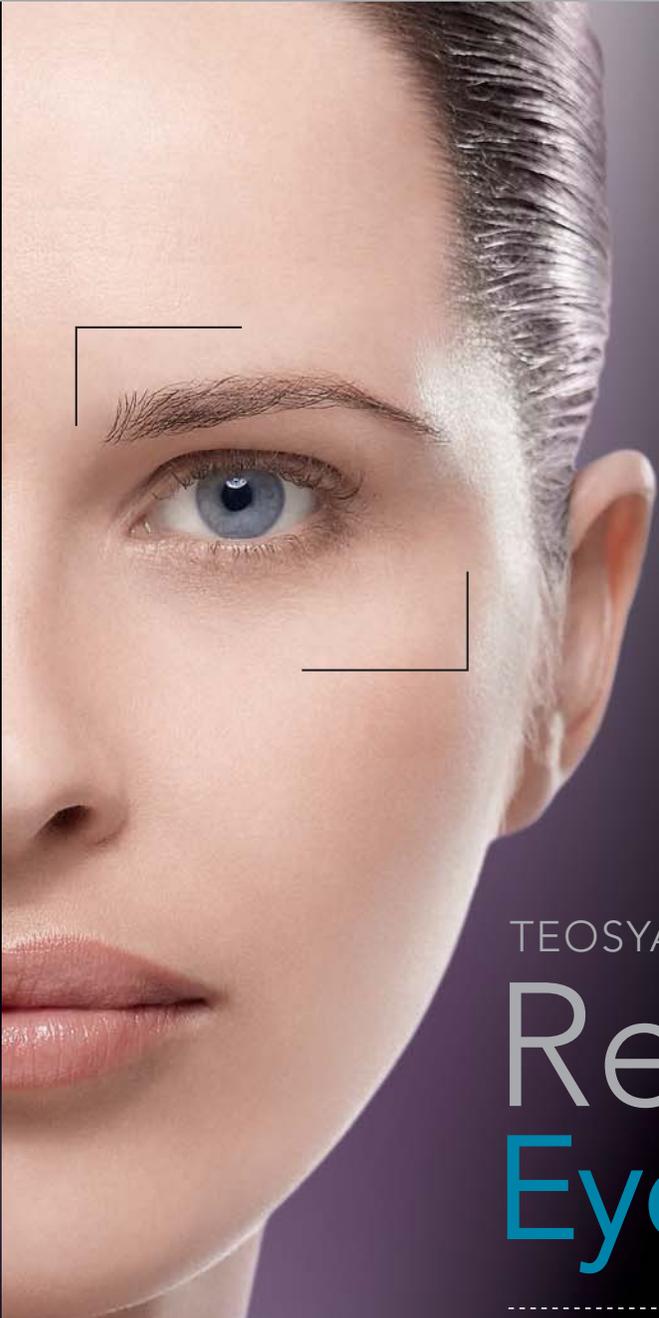

TEOSYAL PURESENSE

# Redensity [II] Eyes


Un gel diferente diseñado  
para **las ojeras**

LABORATORIES  
**TEOXANE**  
GENEVA


[www.teoxane.com](http://www.teoxane.com)

# OJERAS: UNA ZONA DELICADA

## ➔ ZONAS ANATÓMICAS E HISTOLÓGICAS

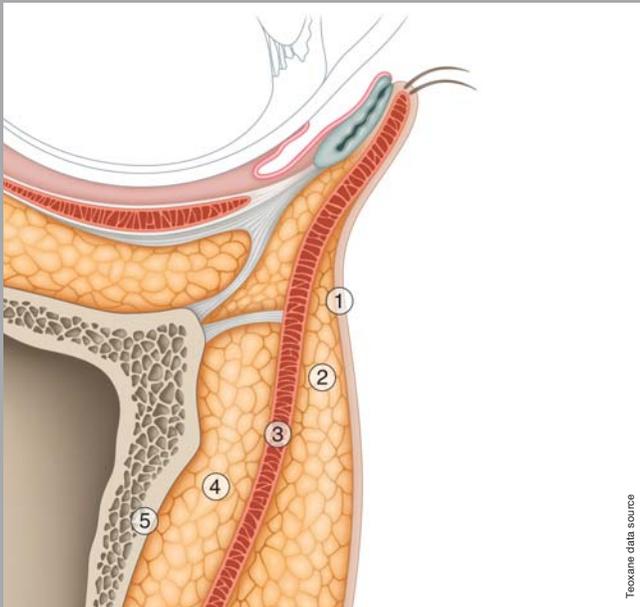


- ① Piel fina, nivel bajo de hialuronidasa
- ② Grasa supraorbital
- ③ Músculo supraorbital
- ④ Grasa suborbital
- ⑤ Periostio

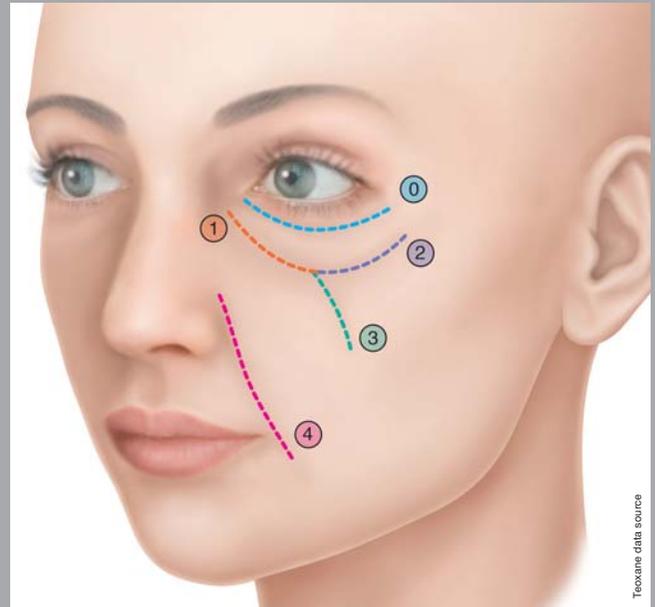


- ① Línea palpebral
- ② Lagrimal
- ③ Surco palpebromalar
- ④ Pliegue mediojugal
- ⑤ Pliegue nasolabial

## ➔ ESPECIFICIDADES ANATÓMICAS DEL ÁREA SUBORBITAL

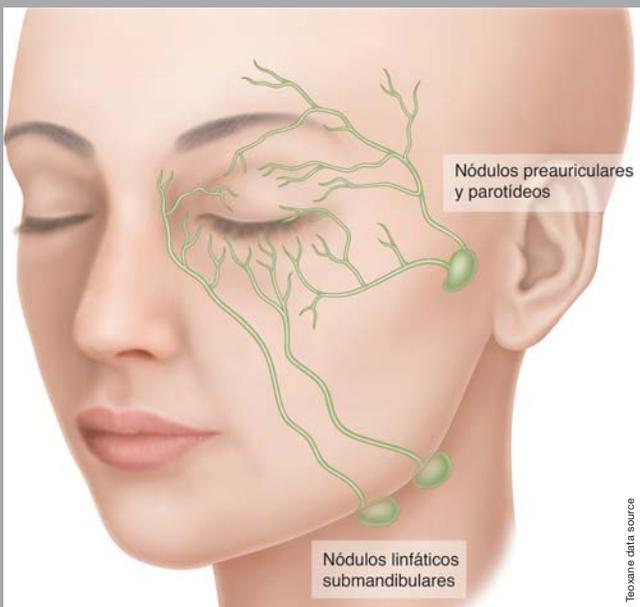

Un sistema linfático complejo

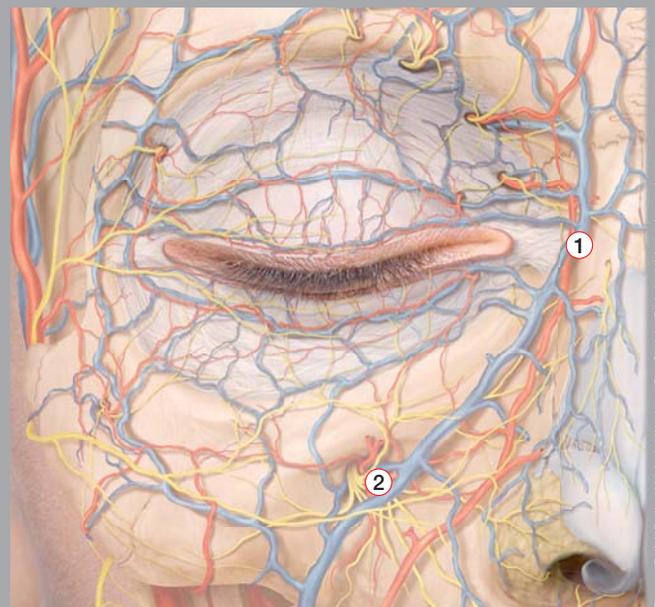

Zonas de alto riesgo: ① Arteria angular  
② Aparición del nervio V2 infraorbital

TEOSYAL PURESENSE

# Redensity [II] Eyes



## UN GEL DIFERENTE DISEÑADO PARA TRATAR LAS OJERAS Y CORREGIRLAS DE FORMA NATURAL Y DURADERA

➔ UNA FÓRMULA 3 EN 1 SOFISTICADA Y SINÉRGICA QUE COMBINA INGREDIENTES NATURALES

<b>ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) SEMI-RETICULADO de 15 mg/g</b> Mezcla de AH reticulado <sup>(1)</sup> (BDDE) y AH no reticulado	<b>+</b>	<b>COMPLEJO DERMO-REESTRUCTURANTE</b> <sup>(2)</sup> <b>Ocho aminoácidos:</b> Glicina, lisina, treonina, prolina, isoleucina, leucina, valina y arginina <b>Tres antioxidantes:</b> Glutatión, N-acetil-L-cisteína, ácido alfalipoico <b>Dos minerales:</b> Cinc, cobre <b>Una vitamina:</b> B6	<b>+</b>	<b>LIDOCAÍNA</b>
--	----------	---	----------	------------------

➔ UN SUTIL EQUILIBRIO ENTRE UN BAJO NIVEL DE AH Y AH SEMI-RETICULADO: UNA ACTIVIDAD HIGROSCÓPICA REDUCIDA

- Para **reducir el riesgo de edema e hinchazón** con una cantidad < 0,5 ml por ojera.<sup>(3)</sup>

➔ VISCOELASTICIDAD PERFECTA: GRAN CAPACIDAD DE EXTENSIÓN

- Para **maximizar la facilidad de inyección** (81%\*) y **posicionamiento** (100%\*).<sup>(3)</sup>



Photos: Teoxane data source

➔ UN GEL LIGERO QUE EJERCE POCAS PRESIÓN SOBRE EL TEJIDO

- Para **reducir el riesgo de edema**.<sup>(3)</sup>

(1) Patente sobre la tecnología RHA : Resilient Hyaluronic Acid™

(2) Tecnología pendiente de patente

(3) Estudio clínico multicentro de fase III en 67 pacientes de un año de seguimiento (2010)

\* Evaluación de los facultativos

# Redensity [II] Eyes



## RESULTADOS DE SEGURIDAD Y EFICACIA: ESTUDIO DE FASE III <sup>(1)</sup>

### ➔ PROTOCOLO CLÍNICO

- Ensayo clínico multicentro llevado a cabo por seis facultativos en 67 pacientes
- Seguimiento: 1 año
- Seis visitas: día de la inyección, una comprobación a los 15 días, un mes, tres meses, seis meses y doce meses
- Evaluación cruzada GAIS\*
- Sin retoque en el 72% de los casos. Retoque únicamente necesario en pacientes inyectados con 0,2 ml al principio

### ➔ RESULTADOS DE EFICIENCIA

#### • PACIENTE Nº 1:

- Indicaciones: deformación del surco lagrimal
- Volumen inyectado: 0,15 ml en el lado derecho y 0,20 ml en el lado izquierdo
- Inyección lenta

ANTES



DESPUÉS


Resultado inmediato después de la inyección



#### • PACIENTE Nº 2:

- Indicaciones: Deformación del surco lagrimal y surco palpebromalar
- Volumen inyectado: 0,20 ml en cada lado
- Inyección lenta

ANTES

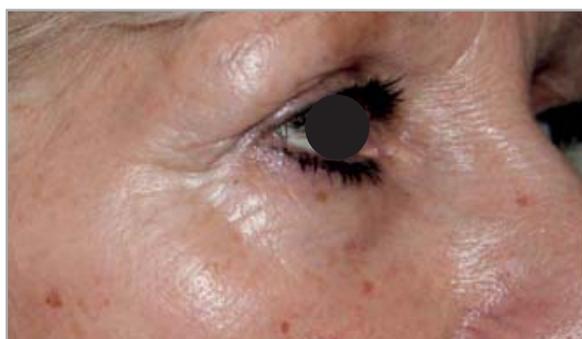

DESPUÉS

Resultado inmediato después de la inyección



(1) Estudio clínico multicentro de fase III en 67 pacientes de un año de seguimiento (2010)


\* GAIS: Global Aesthetic Improvement Scale (Escala de mejora estética global)

# Redensity [II] Eyes



## RESULTADOS DE SEGURIDAD Y EFICACIA: ESTUDIO DE FASE III <sup>(1)</sup>

### ➔ ALTO GRADO DE SATISFACCIÓN: EVALUACIÓN POR LOS PACIENTES Y LOS FACULTATIVOS

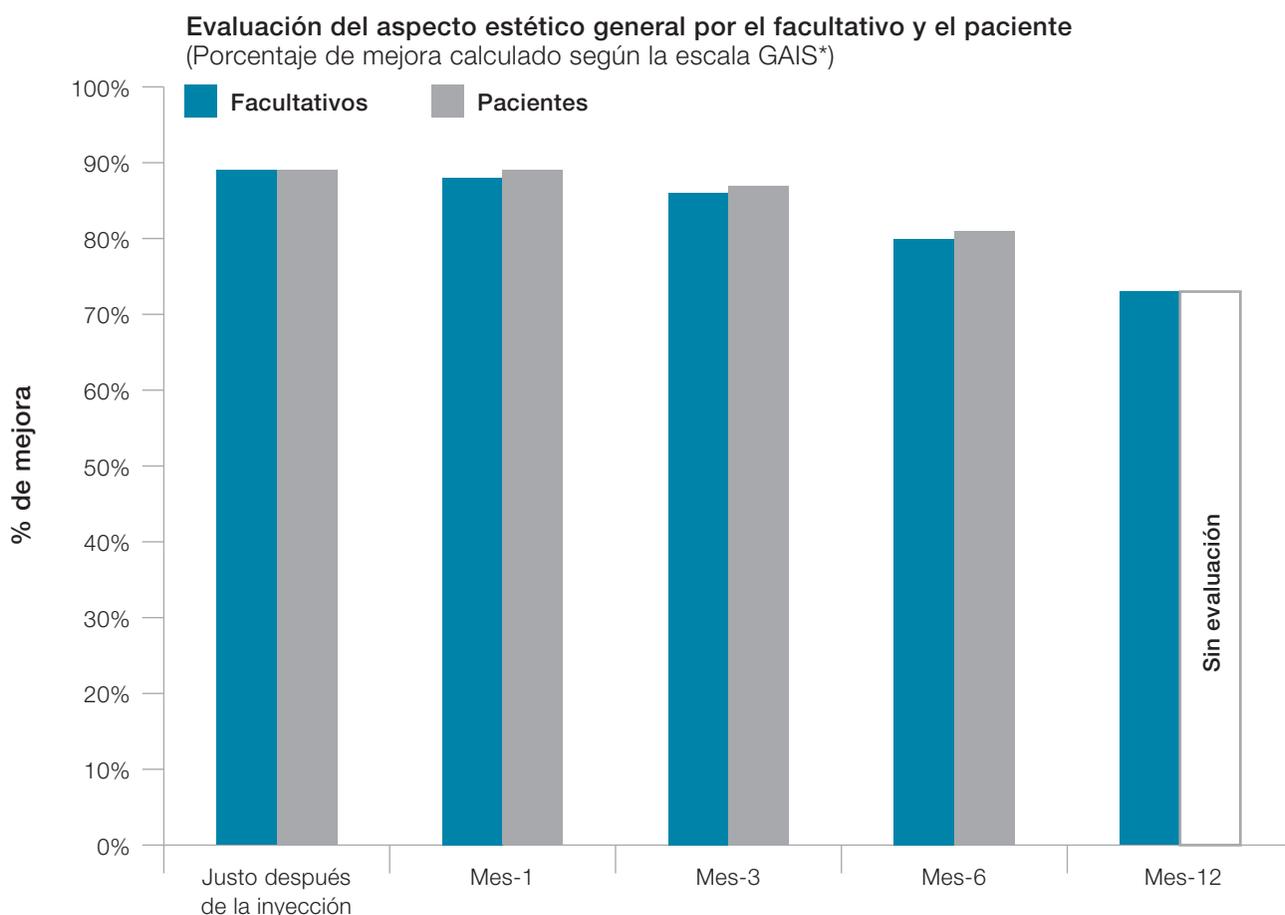

### ➔ TOLERANCIA RECONOCIDA EN UN AÑO

- La seguridad de Teosyal® PureSense Redensity [II] quedó demostrada con un volumen medio inyectado de 0,37 ml por ojera
- De 67 pacientes:
  - Se observaron cuatro casos de efectos secundarios temporales. La rojez e irritación postinyección desaparecieron tras 72 horas.
  - Se observó un solo caso de edema. El edema se reabsorbió de forma espontánea en menos de un mes (0,6 ml inyectados)
  - No se observó ningún efecto Tyndall

(1) Estudio clínico multicentro de fase III en 67 pacientes de un año de seguimiento (2010)

\* GAIS: Global Aesthetic Improvement Scale (Escala de mejora estética global)

# Redensity [II] Eyes



## DIAGNÓSTICO: UN PASO ESENCIAL

### ➔ DIAGNÓSTICO ADECUADO DE LAS OJERAS PARA UNA EFICACIA Y TOLERANCIA ÓPTIMAS

- Siente al paciente para su diagnóstico y evaluación en una posición semi-reclinada
- Ejerce una ligera presión sobre el ojo antes de la inyección para ayudarse:
  - Determine el margen orbital
  - Detecte cualquier insuficiencia linfática
- Realice una prueba rápida para asegurarse de que no existe una flaccidez palpebral excesiva


### ➔ INDICACIONES

- Ojeras
- Inicio del surco lagrimal
- Surco lagrimal
- Surco palpebromalar
- Bolsas malares o palpebrales mínimas

*Para la zona malar y jugal, utilice rellenos con mayor poder voluminizador*



Teovane data source

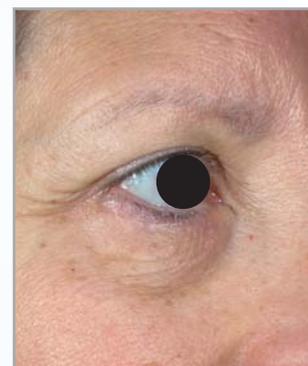

Teovane data source

### ➔ INDICACIONES INCORRECTAS

- Círculos oscuros y pigmentados únicamente
- Grandes bolsas malares o palpebrales



Photos: S. Pognonec (France)



Photos: S. Pognonec (France)

Círculos oscuros pigmentados

Grandes bolsas palpebrales


TEOSYAL PURESENSE

# Redensity [II] Eyes


## UNA TÉCNICA DE INYECCIÓN PRECISA

### ➔ TÉCNICAS DE INYECCIÓN

- Inyección lenta
- Supraperiostio profundo
- Suborbicular

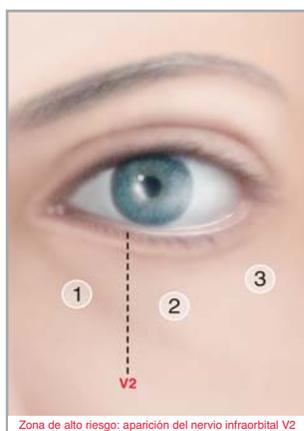

Técnica microbolo  
con aguja

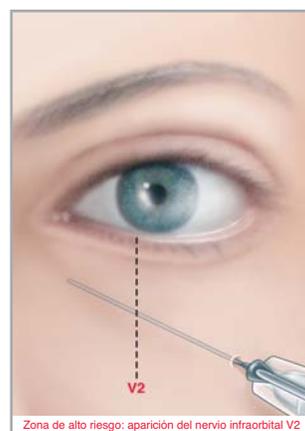

Técnica retrógrada  
con cánula

### ➔ DOSIS RECOMENDADA

- **Cantidad para cada ojera < 0,5 ml:**

Para obtener la máxima seguridad y buenos resultados a largo plazo, se recomienda encarecidamente no inyectar más de 0,5 ml de Teosyal® PureSense Redensity [II] en cada ojera.

### ➔ PROTOCOLO

- **Primera sesión:** se recomienda la subcorrección
- **Sesión de retoque:** un mes después solo si es necesario

### ➔ TEOSYAL® PURESENSE REDENSITY [II]

- Envase 2 x 1 ml
- Marcado CE: categoría III
- Organismo notificado : BSI (0086)



SWISS INNOVATION APPLIED TO BEAUTY



HYALURONIC ACID LIDOCAINE

TEOSYAL PureSense Redensity [II]

2 x 1 ml

LABORATORIES TEOXANE GENEVA

LABORATORIES TEOXANE GENEVA

Les Charmilles - Rue de Lyon, 105 - CH 1203 Genève

Tél. : +41 (0) 22 344 96 36 - Fax : +41 (0) 22 340 29 33

Información general : info@teoxane.com

Servicio de información médica : medical@teoxane.com

www.teoxane.com

REF: 500146 - CONCEPTION : LEMAHIEU DESIGN